



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

## **THERMO PORTAVACUNAS 12LTR.**

**MARCA: GREETMED**

Es un equipo que ha sido diseñado, para propósitos específicos de transporte y óptima conservación de vacunas, plasma, productos biomédicos, productos biogénicos. Es ideal para clínicas, hospitales, centros de salud, centro de emergencias en ciudad o zonas rurales, manteniendo la temperatura estable de los mismos, en condiciones extremas, permitiendo que las medicinas sensibles a cambios de temperatura pueden ser cuidadosamente trasladados por prolongados periodos de tiempo, inclusive en climas tropicales.

### **ESPECIFICACIONES GENERALES:**

- Elaborada en material polipropileno.
- Cinta de nylon.
- Indicador digital de temperatura interna de la caja.
- 02 clavijas de seguridad en la tapa.
- 01 manija de polipropileno.

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Capacidad de almacenamiento: 12Lt.
- Número de ICE packs (envase refrigerante): 04 unds.
- Tiempo de Conservación de frío (2°C a 8°C para temperatura ambiente de 24°C a 35°C = 40 horas).

### **INDICACIONES:**

- Antes de usar el frasco de hielo colocar en el refrigerador hasta que esté completamente congelado.
- Después de que el contenido alcance la temperatura indicada, las ponen en la caja para ser apilados, y asegurar el paquete de hielo rígido se coloca en la posición correcta.
- Se usa cerca de la tapa de la caja para mantener el aislamiento térmico eficiente.
- Si el aislamiento térmico no es bueno después de usar por un período de tiempo colocar el paquete de hielo rígido en el congelador de nuevo para ser congelados.
- Tapa con bisagras y broche para un mejor sellado.



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462

240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)

[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)